

Simple, seguro e higiênico



imagem ilustrativa



**COLETOR DE URINA SISTEMA
FECHADO HOSP TRADE®
COM ANTI-REFLUXO
MOD. CUHT-SFAR**



HOSP TRADE
distribuindo saúde

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO HOSP TRADE COM ANTI-REFLUXO MOD. CUHT-SFAR

Reg. ANVISA 80275270004

O coletor de urina Hosp Trade contribui decisivamente para a redução do risco de infecção, satisfazendo todas exigências e condições de higiene feitas a um sistema fechado de alta qualidade. Além disso, ele é persuasivamente econômico.

Conector universal rígido com porta para retirada de amostra através de seringa sem agulha.



Conector rígido universal com capa protetora projetado adequadamente para a maioria dos catéteres e sondas. O conector possui anéis cônicos opostos à direção da extração,

evitando que escorregue desconectando o catéter ou sonda.

A coleta de amostra da urina pode ser realizada na porta do conector com uma seringa Luer sem agulha na porta do conector.

Os ferimentos com agulhas são evitados e o risco de bactérias invasoras é bastante reduzido.

Câmara de gotejamento com ventilação com dispositivo anti-refluxo integrado.



A ventilação da câmara de gotejamento juntamente com o alto nível de segurança no funcionamento da válvula anti-refluxo impede o refluxo da urina bem como de infecções

ascendentes. A câmara de gotejamento possui proteção antibacteriana e é a prova de líquidos, evitando o acúmulo de urina e de infecção.

Além disso a ventilação na bolsa garante o equilíbrio de pressão e desempenho, mesmo sob alta carga de pressão.


Alça de fixação segura



O coletor de urina sistema fechado pode ser fixado com segurança na lateral de camas por meio de um gancho plástico e um cadarço adicional. Graças a sua fixação firme, a quantidade de urina excretada pode ser lida facilmente.



Dreno na parte inferior anti-pingos

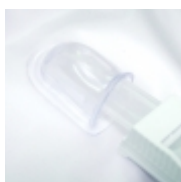

Proporciona o completo esvaziamento do coletor de forma rápida e higiênica, graças à saída de não-gotejamento na parte inferior. O encapamento da ponta do tubo do dreno garante uma fixação segura do mesmo, evitando a contaminação potencial do ambiente e ainda mantém o piso limpo.

Descritivo técnico

- Bolsa para coleta de diurese, graduada aproximadamente até 2.000ml, transparente na parte da frente e opaca no verso, para melhor visualização do aspecto da diurese.
- Câmara gotejadora tipo Pasteur que evita ocorrência de infecções ascendentes, com dispositivo anti-refluxo.
- Tubo extensor de 1,20cm em PVC transparente mais fino, com pinça corta-fluxo, conector com ajuste perfeito para sonda vesical e tampa protetora.
- Membrana em látex que garante múltiplas aspirações para coleta de urina, com o uso direto de seringa, sem agulha.
- Suporte de fixação com haste retangular que permite o manuseio com apenas uma das mãos e fixação segura em todos os tipos de leitos e cordão para fixação na maca.
- Tubo de drenagem amplo e ergonômico com dispositivo corta fluxo, que permite o rápido e eficiente esvaziamento da bolsa coletora e a eliminação de coágulos, sendo sua manipulação feita com apenas uma das mãos, reduzindo o risco de contaminação.
- Esterilização por Óxido de Etileno, garantia por 5 anos, desde que a embalagem esteja íntegra.
- Embalagem individual em papel grau-cirúrgico de fácil abertura.



HOSP TRADE
distribuindo saúde

Rua Dom Lino, 672 - Amadeu Furtado - CEP: 60.455-545 - Fortaleza - Ceará - Brasil
PABX: 85 3194.6300 Televidas: 0800 77 30230

www.hosptrade.com.br